

Lingettes de désinfection

La lingette permet de nettoyer et de désinfecter les embouts de vos appareils.

Elle contient des agents antimicrobiens qui sont indispensables pour assurer une hygiène parfaite de vos aides auditives.



Fréquence d'utilisation :

Mode d'utilisation :

1. Ouvrez le sachet blanc contenant la lingette,
2. Dépliez la lingette,
3. Passez-la délicatement sur votre embout afin d'ôter le cérumen et de le désinfecter,
4. Laissez sécher l'embout de l'appareil auditif avant utilisation.



IL EST IMPORTANT DE NETTOYER UNIQUEMENT LA PARTIE QUI SE MET DANS L'OREILLE.



Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution.

Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité : ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette et pour aller chez le coiffeur.

En cas de forte pluie, si vous n'avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les.

Entretenir vos appareils permet d'augmenter leur longévité, de préserver votre qualité d'écoute et d'éviter les pannes.