

FILTRES : pare-cérumen



Mode d'emploi avec le cerustop (d'autres filtres existent selon la marque de l'appareil - le mode d'emploi est toutefois similaire).

Le pare cérumen permet de protéger vos appareils du cérumen.


Fréquence d'utilisation :

.....

Description :



Le pare-cérumen est composé de 3 éléments :

1. Le support noir,
2. Le crochet de retrait,
3. Le pare cérumen blanc.

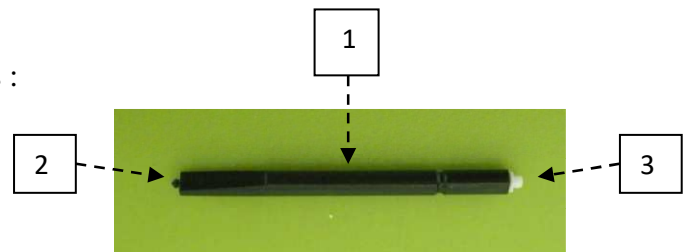


Mode d'utilisation :

1. Insérez le crochet de retrait dans le pare-cérumen usagé,

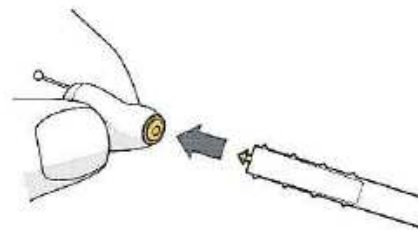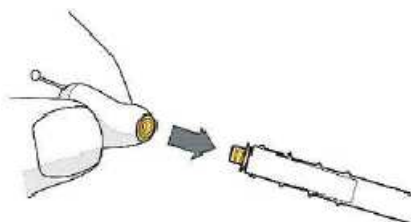


2. Retirez le pare cérumen usagé qui se trouve sur l'aide auditive, dans le canal de la sortie du son,

2. Retournez le support de 180°, afin que le nouveau pare-cérumen soit en position d'insertion,

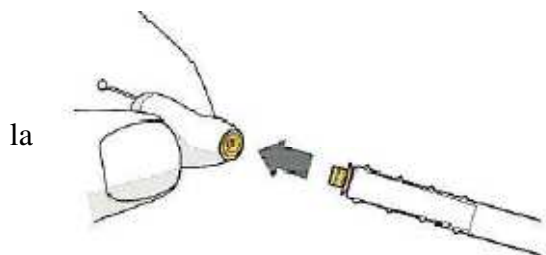

3. Insérez le support dans l'ouverture de sortie du son et enfoncez doucement le pare-cérumen dans l'ouverture,

4. Retirez le support en le maintenant bien dans l'axe.
Le nouveau pare-cérumen se détachera automatiquement du support,

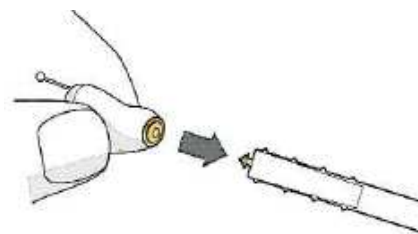

5. Jetez le support et le pare-cérumen utilisé.

*Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution.
Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité :
ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette
et pour aller chez le coiffeur.
En cas de forte pluie, si vous n'avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les.
Entretien vos appareils permet d'augmenter leur longévité,
de préserver votre qualité d'écoute et d'éviter les pannes.*