

Spray de séchage



Le spray de séchage a été conçu pour éliminer l'eau et l'humidité restée dans votre embout, notamment après l'utilisation du Gobelet de nettoyage (voir fiche correspondante).

Fréquence d'utilisation : après chaque utilisation des comprimés effervescents et lors de la présence de gouttelettes dans le tuyau.

Mode d'utilisation :

1. Otez le capuchon blanc,
2. Injectez de l'air directement dans le tube de votre embout,
3. Vous pouvez également en mettre dans l'évent d'aération,
4. Réassemblez l'embout et l'appareil.

Attention de ne pas mélanger l'appareil droit et l'appareil gauche au code couleur.



Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution.

Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité : ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette et pour aller chez le coiffeur.

En cas de forte pluie, si vous n'avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les. Entretien vos appareils permet d'augmenter leur longévité, de préserver votre qualité d'écoute et d'éviter les pannes