

## Guide d'utilisation du chargeur

- 1) Branchez le chargeur à une alimentation électrique, la lumière centrale s'allume, elle est verte.



- 2) Appuyez sur le bouton noir sur le chargeur afin d'ouvrir le couvercle.



- 3) Placez vos appareils auditifs dans les fentes prévues à cet effet.



- 4) Fermez le couvercle du chargeur. Les aides auditives s'éteignent automatiquement et le processus de charge commence.

Le cycle de charge dure environ **six heures**.

### *Les indicateurs lumineux*

- Pendant la charge, la lumière centrale est verte et fixe. Elle indique que le chargeur est sous tension.
- Les deux lumières latérales sont fixes ou clignotent pendant le chargement. Elles indiquent quel côté est en cours de chargement : à gauche, à droite, ou les deux.
- Lorsque le cycle de charge est terminé, les trois lumières sont vertes fixes.



- 5) Retirez les aides auditives du chargeur. Vous pouvez les utiliser.

### **ATTENTION**

- ✓ Si vous chargez des piles non rechargeables, par erreur, les lumières clignotent en rouge.



- ✓ Laissez les aides auditives dans le chargeur uniquement lorsque le chargeur est branché à une alimentation électrique.
- ✓ Retirez les piles rechargeables des appareils auditifs si vous avez l'intention de ne pas les utiliser pendant plusieurs jours.

## Description du chargeur



1 Fentes pour poser les appareils pendant le rechargement des piles.

2 Bouton noir permettant d'ouvrir le couvercle.

3 Lumière centrale

4 Lumières latérales

## Les piles rechargeables

Il faut distinguer la durée de fonctionnement et la durée de vie.

- La durée de fonctionnement de la pile dépend de sa taille :
  - Pour une pile 312 (marron) **14h** quand elle est neuve.
  - Pour une pile 13 (orange) **16h** quand elle est neuve.
- La durée de vie de la pile est d'environ **1 an**.

Une pile rechargeable n'est pas éternelle. Au fur à mesure des cycles de charges / décharges, elle s'use. Elle va se décharger plus rapidement et sa durée de fonctionnement va être diminuée.

*On vous conseille de changer la pile rechargeable au moins une fois par an.*



**NORT-SUR-ERDRE** – 6, rue Aristide Briand – Tél. 02 40 93 65 35

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30

1<sup>er</sup> et 3<sup>ème</sup> samedis de chaque mois de 9h30 à 12h / de 14h à 18h

**SAVENAY** – 7, place des Halles – Tél. 02 40 80 33 49

Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30

2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> samedis de chaque mois de 9h30 à 12h / de 14h à 18h

**TREILLIERES** – 11, rue de Rennes - Tél. 02 51 11 31 87

Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h / de 14 à 18h30

Contact uniquement par téléphone les autres jours de la semaine

## Guide d'utilisation du chargeur



Document offert par votre audioprothésiste

**Audition 44**  
Protection et correction de l'audition

**NORT-SUR-ERDRE**

6, rue Aristide-Briand

**02 40 93 65 35**

**SAVENAY**

7, place des Halles

**02 40 80 33 49**

**TREILLIERES**

11, rue de Rennes

**02 51 11 31 87**

**audition44@hotmail.fr** **www.audition44.fr**